mediVR カグラ設置マニュアル



管理画面にアクセスするにはコチラをクリック

~目次 ①設置マニュアル~ (※クリックで該当箇所に移動します)

<u>1. 内容物の確認</u> ······	page 2
2. 設置イメージ画像 ・・・・・・	·····page 4
<u>3. パソコンの準備</u> ······	·····page 5
<u>4. HTC VIVE とノートパソコンの接続方法</u> ・・	·····page 7
5. ベースステーションの設置方法 ・・・・・・	·····page 9
<u>6. SteamVR の立ち上げ方法</u> ・・・・・・・・	·····page 14
<u>7. SteamVR のルームスケール</u> ······	page 19
8. サウンドの設定確認 ・・・・・・	page 26
<u>9. HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイの装</u>	<u>着方法</u> ••••••page 28

→ ② 操作マニュアルへ進む

→ ③ 使い方動画マニュアルへ進む

※ HTC VIVE の公式サポートページはコチラ

1. 内容物の確認

・パソコン(PC)構成



ノートPC本体





電源ケーブル

●HTC VIVE 構成







ヘッドマウントディスプレイ

コントローラー (2個)

ベースステーション(2個)



リンクボックス



HDMIケーブル



充電器 2個 (コントローラー用)



ACアダプター 2個 (ベースステーション 用)



ACアダプター (リンクボックス用)



USBケーブル

●周辺機材構成



三脚 (2本)



雲台 (2個)

2. 設置イメージ画像



3. パソコンの準備

この項目は3つのステップから構成されます。



<3-1> AC アダプターと電源ケーブルを接続します。



<3-2> 電源ケーブルをコンセントに接続します。 AC アダプターの LED ランプが点灯します。



<3-3>

パソコン背面に AC アダプターを接続します。パソコン前面のバッテリーLED と、電源 LED が点灯します。

4. HTC VIVE とパソコンの接続方法

この項目は5つのステップから構成されます。各ステップでは接続が不十分となることが多いため、確実に差し込まれていることを確認して下さい。



<4-1>

リンクボックスの VR マーク側に左から順に HTC VIVE のヘッドマウントディスプレイ から延びるケーブル先端の HDMI ケーブル、USB ケーブル、電源ケーブルをそれぞ れ接続します。

目印として差込口とケーブルにオレンジ色の印がありますので参考にして下さい。



<4-2>

リンクボックスのパソコン(PC)マーク側に左から順に AC アダプター、USB ケーブル、HDMI ケーブルを接続します。

※右から2番目の miniDP ポートは使用しません。



<4-3>

パソコンに HDMI ケーブル及び USB ケーブルを接続します。



<4-4>

リンクボックスの AC アダプターをコンセントに接続します。

<4-5>

最後に各接続部分が確実に差し込まれていることを再度確認して下さい。 (※接続が不十分となりやすいです)

5. ベースステーションの設置方法

この項目は 10 のステップから構成されます。



<**5-1>** 三脚と雲台を接続します。



<5-2>

三脚下部の脚を開き三脚を立てます。



<5-3>

雲台とベースステーションを接続します。この際、ベースステーションを落下させない ように注意して作業して下さい。



<5-4>

雲台の角度調整ネジを緩め、ベースステーションを 45°~60°程度傾けます。



<5-5>

想定プレイエリア(図中点線)の対角線上(図左:逆パターンも可)、又は前方2箇所 (図右)にベースステーションを設置します(図中青丸)。プレイエリアは横幅が3~ 4m、縦幅が2~3m 必要になります。

この際、周辺に鏡や窓ガラスがあると正確に動作しません。3 次元トラッキングのためにベースステーションから出力されている赤外線が乱反射され、コントローラーの 位置を正確に補足できなくなるためです。鏡、又は窓ガラス周辺での設置は避けて頂 くか、どうしても避けられない場合はベースステーションを図右のような形で設置した り、鏡に布を被せたり、窓ガラスをカーテンで覆う等して下さい。

なお、ベースステーションから出力される赤外線を遮る位置に物を置いたり、人が立ってもコントローラーの位置を正確に補足できなくなります。

例えばベースステーションが図左の対角線上に位置する場合、患者の右側にセラピ ストが立つとコントローラーを見失う可能性が高くなります。必ず左側に立ってリハビ リを行って下さい。



<5-6>

ベースステーション背面、及びコンセントにベースステーション用の AC アダプターを 接続します。



<5-7>

片側のベースステーションが「b」、もう一方のベースステーションが「c」チャンネルに 設定されているか確認します。

「b」と「c」で一対になります。

もしチャンネルがあっていない場合 **<5-8**>に進んで下さい。チャンネルが「b」「c」となっている場合は **<5-9**>に進んで下さい。



<5-8>

チャンネルが合っていない場合、ベースステーション背面のボタンを押して、チャンネルを変更します。ボタンを押すとチャンネルが A→b→c→A(A のみ大文字)の順番で切り替わります。

※電源を切った際に設定されていたチャンネルを引き継ぎますので、設置・片付け時 にボタンに触れないよう注意して下さい。



<5-9>

チャンネルを設定後、しばらくするとベースステーションの上部 LED が緑色に点灯し ます。チャンネル「b」「c」両方の LED で緑色に点灯していることを確認し、次の手順 に進んで下さい(※点灯が確認できない場合はベースステーションの設置方法の手 順を再度 1 から確認して下さい)。



<5-10>

三脚を引き上げてベースステーションの位置が床上 1.5m~2.0m 程度になるように します。

6. Steam VR の立ち上げ方法



この項目は11のステップから構成されます。

<6-1>

パソコンの電源ボタンを押し、パソコンを立ち上げます。



<6-2>

パソコンがインターネット(又は施設内のイントラネット)に接続されていることを確認し て下さい。Wifi で接続されている場合はパソコン画面右下部分に図上段の電波のマ ークが、有線で接続されている場合は図中段の有線接続のマークが、インターネット 接続がない場合は図下段のようにインターネット接続が行われていないマークが表 示されているはずです。



<6-3>

デスクトップ画面で「SteamVR」のアイコンをダブルクリックします。

am (1777)			÷
~	STEAM		
777721-8			
1529-F			
	27-Fを保存する		
		Real	
91212EABJ##	109117 942	(vraken	
アカウントを未分	1803779 860	77722F@lt.dt	

<6-4>

初回立上げ時のみ Steam アカウント名とパスワードの入力を行い、ログインします。 問題なくログインできた場合は<6-7>に移動して下さい。

アカウントを未取得の場合は**<6-5**>の説明に従ってアカウントの取得を行ってください。誰のアカウントでログインしても大丈夫です。



<6-5>

Steam アカウントの取得は、Steam ウェブページの<u>ログイン画面</u>の「Steam に登録」 ボタンから行います。



<6-6>

ネットワークに未接続の場合、接続エラー画面が表示されます。この場合、<6-2>の手順に戻ってパソコンがインターネットに接続されているか確認して下さい。院内の イントラネットに接続されている場合には「ツールを起動」ボタンを押して次の手順に 進んで下さい。



<6-7>

デスクトップ画面内(通常右下)に Steam VR 画面が立ち上がります。HTC VIVE ヘ ッドマウントディスプレイのマーク(図左側)とベースステーションのマーク2 個(図右 側)が緑色に点灯していることを確認します。

※もし HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイのマークが点灯していない場合はヘッド マウントディスプレイをベースステーションに対して遮蔽物の無い場所に置いて下さ い。それでも点灯しない場合には「4. HTC VIVE とパソコンの接続方法」に戻り、HTC VIVE とパソコンの接続がしっかりとされているか再度確認して下さい。 ※※Steam VR はパソコン画面上の扱いやすい場所に移動させることも可能です。



<6-8>

コントローラー2 個の電源ボタンを 1 秒程度長押しし、電源ボタンから指を離すとコン トローラーの電源が ON になります。電源 ON 時、コントローラーが振動し、短いサウ ンド(効果音)が流れコントローラーの電源ボタン下の LED が緑色に点灯します。



<6-9>

コントローラーの電源を ON にした後 SteamVR 画面を確認します。HTC VIVE ヘッ ドマウントディスプレイ、コントローラー2 個、ベースステーション 2 個のマークがすべ て緑色に点灯していることを確認します。コントローラーが上手く認識されない場合は **<6-11>**を参照下さい。



<6-10>

HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイはしばらく動かさないでいると節電と負荷軽減のため、待機状態になり緑色の点灯が解除されます。HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイを持ち上げる等、物理的に動かすと待機状態が解除されます。

これらの切替は正常動作ですので HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイマークが消 灯しても(待機状態に移行しても)問題ありませんので御安心下さい。



<6-11>

コントローラーが上手く認識されない場合、ベースステーションに対して遮蔽物の無い 場所で少し動かしてみて下さい。それでも認識しない場合はコントローラを手動でペア リングします。SteamVR 画面の▼をクリックして、メニューー覧を呼び出し、「デバイ ス」>「コントローラのペアリング」を選択し、画面の指示に従って手順を完了させま す。

7. Steam VR のルームスケール

この項目は13ステップから構成されます。

ベースステーションの位置を動かす場合にはその度にルームスケールを実行して下 さい。



<7-1>

SteamVR 画面の▼をクリックして、メニューー覧を呼び出し、「ルームセットアップ」を 選択し、画面の指示に従って手順を完了させます。



<7-2>

ルームセットアップ画面が立ち上がりましたら、画面左側の「ルームスケール」ボタン をクリックして下さい。



<7-3>

「スペースを確保する」では、特に操作等は必要ありません。プレイエリア内に障害物等が無いことを確認し、「次へ」ボタンをクリックして下さい。



<7-4>

「トラッキングを確立する」では、まず HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイとコントロ ーラー2 個のトラッキング状態を確認します。それぞれのマークが緑色に点灯してい れば「利用可能」な状態にあるため「次へ」ボタンをクリックして下さい。

利用不能な場合は「6. SteamVR の立ち上げ方法」を参考に利用可能な状態に復帰 させてください。



<7-5>

「モニターの位置を定める」では、向きの基準を定めます。プレイエリアの中心付近に 立ち、椅子の背もたれの方向にコントローラーを向け、画面内のバーが溜まるまで、 コントローラーのトリガーボタン(※引き金部分)を長押しして下さい。この際、コントロ ーラーが振動します。画面内バーが溜まりきったことを確認し、トリガーボタンから指 を離して、画面内の「次へ」ボタンをクリックして下さい。



<7-6>

「床の位置を定める」では、機器に床の高さを記憶させます。コントローラーを床上に 置き、次に「床をキャリブレーション」ボタンを押して下さい。正確な床位置平面を記録 させる為、2 つのコントローラーは 30cm 以上距離をおいて床上に置いて下さい。ま た、床上に置いたコントローラーとベースステーションの間に遮蔽物が無いようにして 手順終了までコントローラーを一切動かさないようにお願いします。



<7-7>

「床をキャリブレーション」ボタンを押すと、ボタン内のバーが右方向に向けて溜まって いきます。バーが溜まりきったら、画面内「次へ」ボタンをクリックして下さい。この際、 バーが途中で止まりながら溜まっていくような場合は床位置の記録が正常に出来て いない可能性が高いです。コントローラー位置を再確認し、手順をやり直して下さい。





「スペースを計測する」では、プレイエリアを計測します。この画面では「次へ」ボタンを クリックして下さい。



<7-9>

「スペースをトレースする」画面に切り替わります。

「詳細モード」にチェックが入っていない事を確認した後、片方のコントローラーを持ち、トリガーボタンを押したまま、コントローラーでプレイエリア内の任意の部分を囲っ て下さい。この際、コントローラーが振動します。なお、プレイエリアを囲い終わるまで トリガーボタンを離さないようにお願いします。やり直す場合は一旦「戻る」ボタンを押 して再度同じ作業を行ってください。

※「詳細モード」にチェックを入れるとプレイエリアの四隅でコントローラーのトリガーボ タンを押すだけでエリアの指定が可能なため、より簡便にプレイエリアの指定が行え ます。



<7-10>

プレイエリアを囲った後、トリガーボタンを離すと画面内「次へ」ボタンが押せるように なりますので、クリックして下さい。



<7-11>

プレイエリアが設定されます。

これは自動的に設定されたものなので、任意の範囲、向きに編集する必要があります。画面内左下の「編集」ボタンをクリックして下さい。

※ 囲ったエリアが 2.0m x 1.5m の範囲以下であった場合、エラーになります。その 場合は「戻る」ボタンをクリックし、前手順をやり直して下さい。

※※この段階では「次へ」ボタンは押さないようにして下さい。



<7-12>

まず、プレイヤーに座ってほしい位置 / 向き(椅子の上)に HTC VIVE ヘッドマウント ディスプレイを置きます。次に、編集画面内で緑に着色されたプレイエリアの大きさ、 向きを編集し、HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイの向きと編集画面内の矢印の向 きを一致させます。編集が完了したら、「次ヘ」ボタンをクリックします。



<7-13>

最後に「セットアップ完了」画面で「終了」ボタンをクリックします。

ルームスケールの完了後は、ベースステーションを一切動かさない(高さも含む)よう にして下さい。

動かす場合は、ルームスケールを最初からやり直す必要があります。

8. サウンドの設定確認

この項目は3つのステップから構成されます。



<8-1>

サウンド設定がパソコンからの出力となっているか mediVR カグラの立上げ前に確認します。まずパソコン画面右下のタスクバー内のスピーカーマークをクリックします。

再生デバイスを選択します 〜 メビーリー (3- HIC VIVE)
HTC-VIVE-C (NVIDIA High Definition Audio)
Realtek Digital Output (Realtek High Definition Auc
4») — 🔒 100
x ^R ∧ 🛥 Φ)) //; 😒 🚺 2:16 💭

<8-2>

再生デバイスが「スピーカー(Real High Definition Audio) ※PC 等によって表記が 異なることがあります」になっているか確認して下さい。

それ以外のデバイスが選択されている場合は変更して下さい。

なお、この確認&操作は必ず mediVR カグラの立上げ前に行なって下さい。立上げ後にサウンド設定を変更しても一度ソフトを終了しない限り反映されませんので御注意下さい(その場合音が出ません)。

※マニュアルではノートパソコン本体から音を出す場合の手順を記載しています。外 部スピーカー等を使用する場合は該当するデバイスを選択して下さい。 <8-3>

上記の手順を行ってもパソコンから音声が出力されない場合には Steam VR の設定 画面からオーディオ設定を行います。Steam VR を立ち上げ「三」のメニューをクリッ ク、「設定」を選択、「オーディオ」をクリックし、オーディオ出力デバイス内の「Other」を 選択します。

プルダウンメニューから出力を行いたいデバイスを選択して下さい。

上記の手順で設定は完了です。mediVR カグラを再度立ち上げていただき、音が出るようになったか確認をお願い致します。詳しくは以下の動画もご参照下さい。

上記の手順で解決しない場合は大変恐れ入りますが、弊社までお問い合わせ下さい。

動画: WEB ページをご参照下さい(<u>https://youtu.be/JavgnB_bCWw</u>)

9. HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイの装着方法

この項目は5ステップから構成されます。

ヘッドマウントディスプレイはプレーヤーが椅子に座った状態で装着してください。 なお、ヘッドマウントディスプレイの装着方法の詳細は「<u>使い方動画</u>」の「1. 基本準備 (14 分 26 秒)」をご参照下さい。



<9-1>

プレーヤーに HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイを装着する際には、頭上のマジッ クテープと背面のネジ調整部を使用します。



<9-2>

背面のネジ調整部は時計回り(図中右)に回すと「しまり」、反時計回り(図中左)に回 すと「ゆるみ」ます。まずはヘッドマウントディスプレイを被せやすいようにネジ調整部 分を反時計回りに回し、ストラップを緩めておきます。



<9-3>

まずフェイスパッド部を顔に押し当ててプレイヤー自身にゴーグルを持ってもらいま す。次にストラップ部分を矢印の方向に押し下げて、頭に被せます。最後にマジックテ ープ及び背面のネジを調整して頭にフィットさせます。



<9-4>

装着時及びプレイ中、HTC VIVE ヘッドマウントディスプレイの左側側面に配置されたメニューボタンを押さない(押させない)ように注意して下さい。

ボタンが押された場合、ヘッドマウントディスプレイの画面ではメニュー画面が表示さ れ、ゲーム画面が隠れてしまうことがあります。また、メニュー画面であるかどうかは ヘッドマウントディスプレイを装着している人にしかわからず、パソコン画面等外部か らは分かりませんので注意が必要です。メニュー画面を元に戻すにはもう一度メニュ ーボタンを押します。

なお、mediVR カグラでは初期設定でメニューボタンを無効にしているため上記のエ ラーは生じない可能性が高いですが、もし同現象が確認される場合には「操作マニュ アル FAQ」の 17-2 をご参照下さい。

<9-5> もし画面が眩しいと言われたら

ヘッドマウントディスプレイの明るさを暗く設定して下さい。

Steam VR 上の「ナイトモード」を利用することで mediVR カグラ プレイ中のヘッドマウントディスプレイの明るさを暗くすることが可能です。

まず Steam VR を立ち上げて、画面左上の「三」のメニューをクリックし「設定」を選択 します。新しいウィンドウが立ち上がりますのでウィンドウ内左側「一般」を選択すると 右側に「ナイトモード」と表示された項目があります。この項目を「オン」にするとヘッド マウントディスプレイの表示が『暗く』なります。

*元の明るさに戻す場合は上記作業の「ナイトモード」の項目を「オフ」に設定いただく と、元の明るさに戻ります。

設置マニュアル目次に戻る

→ ② 操作マニュアルへ進む

→ ③ 使い方動画マニュアルへ進む